

Diasend Instruktioner

Har du inte konto hos Diasend idag?

- 1 Här skapar du ett Diasend-konto: https://www.diasend.com/
- 2 Instruktion för hur du skapar konto: Skapa inlogg Diasend

Hur laddar jag ner min data till Excel, JSON eller CSV-format?

- 3 Välj ett tidsintervall (Ju längre intervall, desto bättre).
- 4 Tryck på knappen KONTADM. uppe i högra hörnet.

Granska min data LADDA UPP			4 колт	OADM. LOGGA UT
	Dela data	Anslut app	Nya uppdateringar (Jan 202	(1) Kundsupport
Data för pariodan: 2022-01-14 - 2022-02-15				Mina uppgifter
Sammanställning Glukos CGM In	sulin Jämförelse	3		PDF >
Period: 2022-03-02 - 2022-03-15, 14 daga Välj tidsinterval	I v Inkludera manuellt inmatade värden			
Glukosdatatyp CGM Blodsocker				Utskrift till PDF 🛛 🕖
CGM O Tid CGM aktiv: 89%			Insulin	Ingen information
• 2% Mycket högt 🕧	Tid inom målområdet	• 75%	Kolhydrater	Ingen information
 16% Hög (1) 	Medelvärde	7.4 mmol/L	Romydrater	
• 75% Tid inom målområdet ①	Standardavvikelse	2.7 mmol/L	Aktivitet	Ingen information
• 6% Låg (/)	Visa utökat			
• 1% Mycket lag ()				
Planter val. 4.0 20.0 million L				

- 5 Tryck på exportera data.
- 6 Ange koden nedan.
- 7 Exportera till Excel.

Granska min data LADDA UPP					KONTOAD	M. LOGGA U
			Dela data	Anslut app	Nya uppdateringar (Jan 2021)	Kundsupport
						Mina uppgifter
Data för perioden: 2022-01-14 - 2022-03-15 Dela data 5 Exportera data	 Abonnemang 	Bläddra och anslut ap	par			PDF 🏏
Ange koden nedan	6					
Exportera till Excel						

Vad gör jag med min nedladdade fil nu?

8 Nu kan du ladda upp din fil/filer till din egen säkra zon på Synkzone som du fått inloggningsuppgifter till på din mejl. När datat är uppladdad kommer den bli avidentifierad så ingen vet att din data tillhör dig.





